



Aplicación AMBRA para iOS

1.

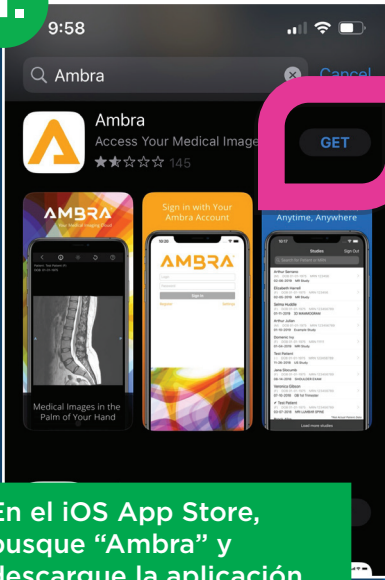

En el iOS App Store, busque “Ambra” y descargue la aplicación Ambra Health.


2.

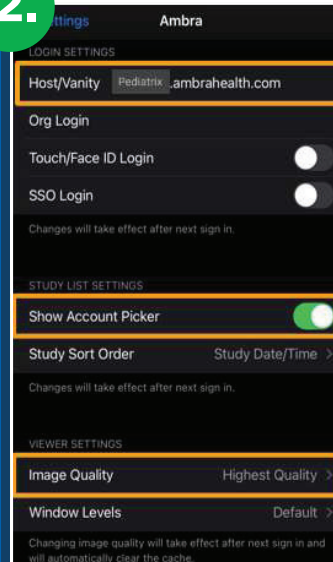

CONFIGURAR LA APLICACIÓN AMBRA HEALTH

1. Navega hasta Configuración
2. Deslícese hacia abajo y haga clic en “Ambra”
3. Escriba “pediatrix.ambrahealth.com” en el campo Host/Vanity
4. Active (habilite) el Show Account Picker (Mostrar selector de cuentas)
5. Seleccione “Highest Quality” (Máxima calidad) en la configuración del visor de calidad de imagen


3.

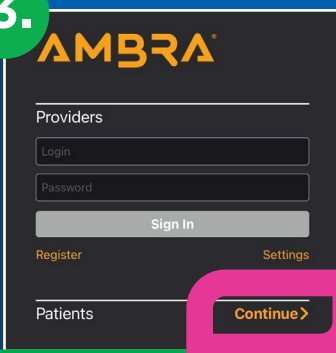


INICIAR SESIÓN

Navegue y haga clic en la aplicación Ambra Health

Desplácese hasta la fila “Pacientes” y haga clic en “Continue”

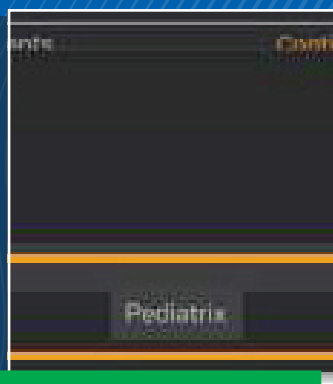

Se le pedirá que seleccione “Pediatrix” en un menú desplegable
Seleccione **Pediatrix**

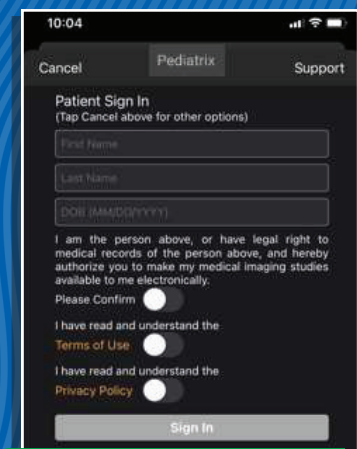


Introduzca sus credenciales de acceso al Portal de Imágenes de Pediatrix

Nótese: se le pedirá que introduzca la autenticación de 2 factores

Aplicación AMBRA para iOS


4.

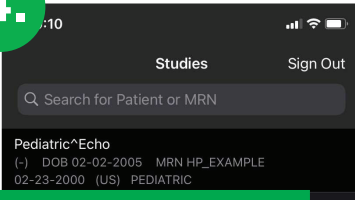

ACCESO A IMAGENES

Una vez iniciada la sesión, accederá a la lista de trabajo de los estudios

Seleccione la **imagen** que desea ver

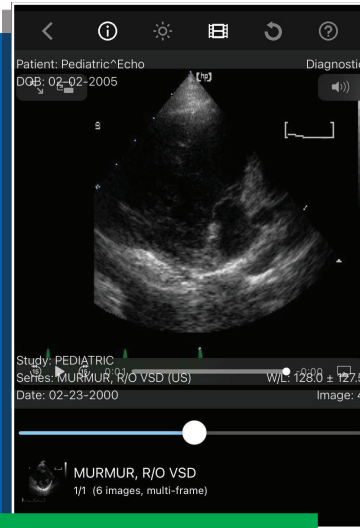

Una vez seleccionada, aparecerá su imagen


NAVEGACIÓN POR LA IMAGEN

Volver a la lista de trabajo

Mostrar u ocultar la superposición

Ajustar el brillo de la imagen

Desplazarse entre diferentes imágenes

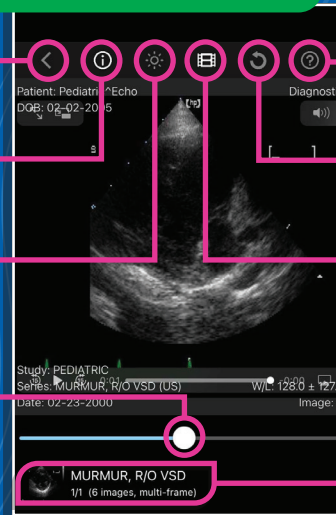

Guía de la aplicación

Restablecer la imagen original

Conmutar el modo de cine para las series de fotogramas múltiples

Navegar a otra serie